

PRODUTO POTENZA BIANCO PERÓXIDO CARBAMIDA PF

DESCRIPCIÓN	Agente blanqueador de uso doméstico supervisado profesionalmente a base de peróxido de carbamida al 10%, 16% o 22%.
INTENCIÓN DE USO	Indicado para el blanqueamiento dental casero supervisado por profesionales. Se puede utilizar en dientes vitales y no vitales (solo externamente) que presenten cambios de color. El producto también está indicado como coadyuvante en el tratamiento de casos leves de tinción por fluorosis o el uso de tetraciclina y sus derivados.
COMPOSICIÓN	Peróxido de carbamida, espesantes y agua desionizada, desensibilizantes y humectantes.
CONDICIÓN BIOLÓGICA	No estéril.
MODO DE USO	<ol style="list-style-type: none">1) Realice la higiene bucal (cepillado y uso del hilo dental) y prepare la bandeja individual para su uso (limpia y seca). Para ello, retire el tapón de la jeringa del producto y coloque la punta del aplicador. Con esto, empuje suavemente el émbolo de la jeringa del producto hasta que el material comience a dispensarse. Aplicar una pequeña dosis del producto, con un volumen equivalente a medio grano de arroz, en el espacio de cada diente a blanquear.2) Coloca la bandeja sobre los dientes para que encaje perfectamente sobre ellos. El contenido de gel que eventualmente se filtra a las encías debe eliminarse con los dedos humedecidos.3) Deje actuar el producto durante el tiempo que le indique su dentista. Durante este período, no ingiera alimentos ni bebidas.4) Pasado el tiempo, retire la bandeja, lávela con agua corriente a temperatura ambiente y séquela. Por lo tanto, almacénelo lejos de la luz solar directa, el calor y la humedad. Enjuágate la boca varias veces hasta que el gel blanqueador se haya eliminado por completo y cepíllate los dientes después de 30 minutos de uso del producto.
PRESENTACIONES A REGISTRAR	Potenza Bianco Peróxido de Carbamida PF 10%: 1379 - 01 jeringa conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 10%

PRODUTO POTENZA BIANCO PERÓXIDO CARBAMIDA PF

+ 01 punta aplicadora

1378 - 03 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 10% cada + 3 puntas aplicadoras

1377 - 06 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 10% cada + 6 puntas aplicadoras

5033 - 08 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 10% cada + 8 puntas aplicadoras

Potenza Bianco Peróxido de Carbamida PF 16%:

1382 - 01 jeringa conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 16% + 01 punta aplicadora

1381 - 03 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 16% cada + 3 puntas aplicadoras

1380 - 06 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 16% cada + 6 puntas aplicadoras

5034 - 1380 - 08 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 16% cada + 8 puntas aplicadoras

Potenza Bianco Peróxido de Carbamida PF 22%:

1385 - 01 jeringa conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 22% + 01 punta aplicadora

1384 - 03 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 22% cada + 3 puntas aplicadoras

1383 - 06 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 22% cada + 6 puntas aplicadoras

5035 - 08 jeringas conteniendo 3 g de peróxido de carbamida 22% cada + 8 puntas aplicadoras