

PRODUTO POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%

DESCRIPCIÓN	Agente blanqueador profesional para aplicaciones de oficina, a base de peróxido de hidrógeno al 35%. El producto tiene una apariencia de gel tixotrópico con un color rojo carmín que cambia a azul claro. La presentación del producto consta de dos frascos cuyo contenido debe mezclarse en una determinada proporción para formar el gel blanqueador.
INTENCIÓN DE USO	Indicado para el blanqueamiento dental en el consultorio. Se puede utilizar en dientes vitales y no vitales (solo externamente) que presenten cambios de color. El producto también está indicado como coadyuvante en el tratamiento de casos leves de tinción por fluorosis o el uso de tetraciclina y sus derivados.
COMPOSICIÓN	Peróxido de hidrógeno al 35%, espesante, neutralizante, mezcla de colorantes, glicoles y agua desionizada.
CONDICIÓN BIOLÓGICA	No estéril.
MODO DE USO	DIENTES VITALES: 1) Seleccione y registre el color de los dientes del paciente utilizando una tabla de colores. Se sugiere registro fotográfico. 2) Aplicar la base hidratante Potenza Idrata en los labios del paciente (especialmente en las comisuras) para hidratar, proteger y aportar una mayor comodidad. Luego, coloque un retractor de labios para facilitar el acceso a los dientes. 3) Realice el protocolo de desensibilización previa al blanqueo: 3.1) Aplicar el agente desensibilizante Potenza Esente al 2% sobre la superficie bucal de los dientes a blanquear, dejándolo durante 10 minutos. Durante este período, realice movimientos de fricción con la ayuda de un micro aplicador desechable. Aplicar el agente desensibilizante Potenza Esente al 2% sobre la superficie bucal de los dientes a blanquear, dejándolo durante 10 minutos. Durante este período, realice movimientos de fricción con la ayuda de un micro aplicador desechable. 4) Seque bien el tejido gingival y aplique la barrera gingival Potenza Blocco en la encía marginal de todos los dientes a blanquear. La capa debe tener aproximadamente 1 mm de espesor y 5 mm de ancho, cubriendo completamente las papilas gingivales. También cubra alrededor de 0,5 mm de la zona

PRODUTO POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%

cervical del diente (esmalte). Luego fotopolimerice la barrera gingival durante 20 a 30 segundos para cada grupo de 3 dientes. Finalmente, asegúrese de que la barrera se vuelva rígida y esté firmemente adherida a la encía antes de continuar.

5) Para formar el gel blanqueador, se debe mezclar peróxido de hidrógeno con el espesante en una proporción de 3: 1. Normalmente una cantidad de 18 gotas (peróxido) a 6 gotas (espesante) es suficiente para aplicar en las arcadas superior e inferior de un premolar a otro.

Para mezclar las fases, dispense las gotas de peróxido de hidrógeno en el recipiente de mezcla que viene con el kit. Luego agregue las gotas de espesante. Luego mezcle vigorosamente durante 40 segundos para obtener una mezcla que exhibe color rojo carmín y alta viscosidad (gel espeso). Nota: Antes de dispensar las gotas de espesante, agite la botella para mezclar.

6) Aplicar el gel sobre la superficie del diente con una espátula o un cepillo, con movimientos de barrido. Cubrir completamente la superficie bucal de los dientes a blanquear, incluidos los interproximales. Extienda ligeramente hasta las superficies incisales / oclusales. La capa de gel debe ser de aprox. 1 mm de espesor.

7) Deje que el gel actúe durante 15 minutos consecutivos sobre sus dientes. Al final de este período o incluso antes, el gel se vuelve azul claro, lo que indica la evolución de la reacción química. Aspire todo el contenido de gel de los dientes con una cánula quirúrgica o endodóntica y elimine el resto de gel con un algodón o una gasa. Luego, vuelva a aplicar el gel dos veces más durante 15 minutos cada una durante la misma sesión, haciendo nuevas mezclas según los pasos 5 y 6. El tiempo total de contacto del gel con los dientes es de 45 minutos (3 x 15 minutos), excepto cuando el paciente refiere demasiada hipersensibilidad.

8) Después de 3 aplicaciones, retire el gel de los dientes con una cánula de succión y límpielos con una gasa. Lave minuciosamente y aspire el contenido.

9) Retirar la barrera gingival desprendiéndola hacia delante con la ayuda de una sonda exploradora. Lavar nuevamente la superficie del diente con chorros de aire / agua, utilizando siempre la ventosa al mismo tiempo (orientar al paciente para

PRODUTO POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%

que no ingiera el agua con el residuo del gel blanqueador).

10) Para finalizar la sesión, pulir los dientes con discos de fieltro asociados a la pasta Potenza Specchi PRO (pasta de pulido de diamante). El resultado del blanqueamiento de la sesión se visualizará mejor después de 1 semana. Por lo general, se necesitan de 2 a 3 sesiones (espaciadas a lo largo de 1 semana cada una) para un tratamiento completo, pero esto se puede flexibilizar según cada paciente.

DIENTES NO VITALES:

Similar a la aplicación externa, POTENZA BIANCO PRO 35% se puede aplicar internamente en la cámara pulpar de dientes desvitalizados tratados endodónticamente. Para esta modalidad de uso, los dientes deben estar libres de grietas clínicamente visibles o en exámenes de imagen, sin antecedentes de trauma o problemas endodónticos actuales.

Para aplicar el producto, aisle el diente con un dique de goma. Realice la apertura coronal y el relieve del material de relleno aproximadamente 2 mm más allá de la unión cemento-esmalte. Selle este espacio aliviado con CIV o resina fluida. Luego, aplique el gel blanqueador dentro de la cámara pulpar durante 3 x 15 minutos cada uno, que comprende una sesión.

Al finalizar la sesión, aspire y lave abundantemente el contenido retirando todo el gel de la cámara. Luego seque el sitio y restaure temporalmente la cavidad con CIV. Informar al paciente de los cuidados de masticación para evitar fracturas dentales.

Al final del tratamiento, restaure el diente de forma permanente. Se sugiere un promedio de 3 sesiones de blanqueamiento interno para la mayoría de los casos, espaciadas con 1 semana de diferencia.

PRESENTACIONES A REGISTRAR

840 - 1 botella de peróxido de hidrógeno 35% conteniendo 15,3 g + 1 botella de espesante de 5,5 g + 1 botella de neutralizante de 10 g + 1 jeringa de barrera gingival de 2,5 g + 1 espátula mezcladora



FICHA TÉCNICA

PRODUTO	POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%
----------------	--

	839 - 1 botella de peróxido de hidrógeno 35% conteniendo 5 g + 1 botella de espesante de 1 g + 1 botella de neutralizante de 10 g + 1 jeringa de barrera gingival de 2,5 g + 1 espátula mezcladora
--	--