

# Z A F I R A

## Etchant gel

Ácido grabador en gel

### DESCRIPCIÓN

Zafira Etchant gel® es un agente grabador de base acuosa que contiene un 37% de ácido fosfórico para acondicionar la estructura del esmalte y la dentina, según las instrucciones e indicaciones de uso que acompañan a los diferentes sistemas de adhesión dental. Posee un color azul que facilita su visualización y control durante la aplicación, además posee buena afinidad con el agua, lo que permite su fácil remoción después del grabado.

### COMPOSICIÓN

“Zafira Etchant gel” contiene ácido fosfórico (37% en peso), agua, agente espesante y pigmento.

### INDICACIONES

“Zafira Etchant gel” se utiliza en la técnica de grabado selectivo del esmalte o grabado total de esmalte y dentina para las siguientes indicaciones:

- Obturaciones de resina fotopolimerizable.
- Cementaciones adhesivas de inlays (de resina fotopolimerizable o cerámica sin metal), coronas, carillas, puentes y postes.
- Cementación de brackets
- Sellado de fisuras.
- Agente limpiador para materiales de restauración dental.

### CONTRAINDICACIONES

- No debe ser usado en tejido pulpar
- El material no debe ser utilizado, cuando no sea posible la técnica de aplicación descrita.

### ADVERTENCIAS

- El ácido fosfórico que contiene el producto es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. Si se deja que el grabador permanezca sobre la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden provocar lesiones. En caso de contacto con otros tejidos, lave inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.
- Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato.
- Verifique el flujo de la jeringa antes de aplicarla intraoralmente. Si encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar.
- La permanencia del producto sobre la superficie dental por tiempos superiores a los especificados puede causar desmineralización excesiva.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación:

1. Retire el tapón de la jeringa de ácido grabador.
2. Gire firmemente una punta dispensadora desechable sobre el extremo de aplicación de la jeringa.
3. Compruebe la instalación de la punta dispensadora y el flujo del grabador antes de la aplicación intraoral.

### Aplicación:

4. Limpiar: Preparar la cavidad o área a ser grabada, limpiándola y secándola, si es necesario aplicar un protector pulpar.
5. Aislar: Un campo de trabajo limpio y seco es esencial para el procedimiento de grabado ácido y evita la contaminación del área de trabajo.
6. Grabado: Aplicar suavemente el gel grabador directamente sobre la superficie a grabar. El gel deberá ser aplicado por 15 segundos, ya sea en esmalte o en dentina. El control del tiempo indicado evita una lesión a la dentina.
7. Enjuague: Después de los 15 segundos de aplicación, el diente debe ser lavado con abundante agua hasta remover totalmente el ácido de la superficie dental.
8. Secado: Eliminar el exceso de agua con aire libre de aceite o motas de algodón. La dentina deberá estar seca pero no deshidratada (mantener la dentina humedecida).
9. Proceder de inmediato con la aplicación del agente adhesivo, conforme a las instrucciones de uso del mismo.

## CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El tiempo de vida útil del producto a temperatura ambiente es de 3 años.

Ver fecha de caducidad en la jeringa/empaque.







Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Mantenga el producto en su empaque original siempre bien cerrado.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 30°C.

**"PRODUCTO DE USO ODONTOLÓGICO, SOLO DE MANEJO POR PARTE DEL PROFESIONAL. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado siguiendo estrictamente sus instrucciones de uso. NEW STETIC S.A. no se hace responsable por daños causados como resultado del uso indebido o el incumplimiento de las instrucciones de uso. Además de esto, el usuario es responsable de comprobar, antes del uso, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso.

 Consulte las instrucciones de uso	 Producto corrosivo.
 Usar guantes	 Mantener alejado de la luz.
 Fabricante	 <b>R<sup>only</sup></b> Solo para EEUU (ley federal de EEUU) restringe la venta del dispositivo por un dentista autorizado o por orden de este

Fabricado por:/Manufactured by:

**New Stetic S.A.**

Cr 53 No.50-09 Guarne, Antioquia - Colombia  
infocolombia@newstetic.com - www.newstetic.com